



OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS

Használati utasítás

Tartósítószer-mentes szemcsepp

Mi az Ocutears® Alo+ és milyen problémák esetén alkalmazható?

Az Ocutears® Alo+, melynek fő összetevői a keresztkötött hialuronsav (0,2%) és az Aloe vera (0,1%), a szemszárazság tüneteinek és a szemben jelentkező kellemetlen érzés kezelésére, valamint a szaruhártya védelmére szolgál.

A keresztkötött hialuronsav a terméknek nagyfokú hidratáló képességet és tartós szemfelszíni jelenlétet biztosító magas viszkoelaszticitást kölcsönöz, melynek köszönhetően a termék a szemszárazság tüneteinek hosszan tartó enyhülését nyújtja.

Az **Aloe Vera** hidratáló, vérbőséget csökkentő és sikosító tulajdonságairól ismert, amelyek fokozzák a szemcsepp nedvesítő hatását, ezáltal kényelmesebbé teszik a látást és meghosszabbítják a frissesség érzését. Az Aloe Vera erős hidratáló és hosszan tartó védőhatásának köszönhetően szemvörösség vagy különösen érzékeny szemek esetén is hasznosnak bizonyult.

Az Ocutears® Alo+ a következő esetekben javallott:

- környezeti tényezők vagy gyógyszerek okozta szemszárazság tüneteinek, irritáció és szemvörösség enyhítésére;
- a szem lubrikálására és a komfortérzet javítására kontaktlencse használatakor

Az Ocutears® Alo+ használata hasznos a következők ideje alatt és után:

- hosszan tartó napsugárzásnak kitéve;
- légkondicionáló használata;
- digitális képernyők (monitor, telefon) tartós használata;

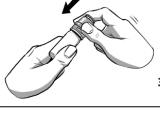
Az Ocutears® Alo+ enyhítheti a szemműtét után jelentkező kellemetlen szempanaszokat.

Hogyan kell az Ocutears® Alo+-t használni?

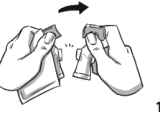
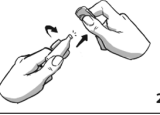
Cseppentsen a szemébe 1–2 csepp naponta egyszer vagy többször, vagy a kezelőorvosa/gyógyszerésze által javasolt gyakorisággal.

A palack kinyitása előtt mosson kezet, és ügyeljen a higiénia a használat során.

Palack:

1) Az első használatot megelőzően a dézsmazárát húzva távolítsa el azt teljesen.	
2) A palackot finoman nyomva cseppentsen 1 csepp a szemébe.	
3) Zárja vissza szorosan a palackot használat után.	

Egyadagos tartály:

1) Az egyadagos tartályokból álló szettből tépjén le egyet.	
2) A kupak elfordításával nyissa ki a tartályt.	
3) A tartályt finoman nyomva cseppentsen 1 csepp a szemébe.	
4) A tartályban maradt terméket a használatot követően dobja ki.	

Santen

A betegájékoztató felülvizsgálatának dátuma 2021. március.

A termék első alkalmazása előtt figyelmesen olvassa végig a teljes betegájékoztatót.

Őrizze meg a betegájékoztatót; a későbbiekben még szüksége lehet rá, hogy újra elolvassa.

Ha bármilyen további kérdése lenne, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ha a tünetek továbbra is fennállnak, vagy Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, keresse fel kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Figyelmeztetések:

- Ne használja a terméket, ha allergiás vagy túlérzékeny annak bármely összetevőjére.
- Súlyos szaruhártya betegség esetén használat előtt beszéljen orvosával.
- A palackot a felbontástól számított 90 napon belül használja fel; az egyadagos tartályt felbontást követően azonnal fel kell használni és használat után ki kell dobni.
- Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl.
- Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült.
- Hőtől, napfénytől, nedvességtől óvandó, gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne nyelje le a folyadékot.
- Ügyeljen rá, hogy a csepegtető csúcsa ne érintkezzen a szemmel.
- Tárolás 25 °C alatt. Ne fagyassza le.

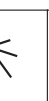
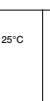
Az Ocutears® Alo+ összetevői:

Keresztkötött hialuronsav 0,2%, Aloe Vera gél 0,1%, dinátrium-tetraborát-dekahidrát, bórsav, nátrium-klorid, víz injekcióhoz.

Kíszerelések:

10 ml-es palack (többadagos, tartósítószer-mentes), 0,35 ml x 15 egyadagos tartály, 0,35 ml x 5 egyadagos tartály (ingyenes minta)

Bővebb információért, kérjük, beszéljen kezelőorvosával vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Santen irodával a következő címen: www.santenhungary.hu/



Gyártási idő

Gyártó

25 °C alatti hőmérsékleten tárolandó.

Ne tegye ki napsugárzásnak.

Aszeptikus gyártási technológiával sterilizálva.

Gyártási tétel kódja

Lejárati idő

Olvassa el a használati utasítást!

Újra felhasználni tilos!

Ne használja, ha a csomagolás sérült.

Szárazon tartandó!



MARVACO OY
PELTOTIE 20,
FIN-28400 **ULVILA**, FINLAND
repro@marvaco.fi
marvaco.fi • marvaco.se

09.04.2021

Proof No. 8

Santen

Part No: 4220-01

Leaflet Ocutears Alo+

Item No: 017512, 017558

Dimensions: 130x360 mm

Fonts/Size:
Helvetica Neue 7-16 pt

Country: HU

Component code:
017599

Colors:



Black



Technical

PLEASE, CHECK THE SPOT COLORS FROM PANTONE® COLOR GUIDE.