

Revihyal®

hipoozmoláris szemészeti gél száraz szem szindrómára

LEÍRÁS: A **Revihyal®** riboflavinnal konjugált hialuronsavat (**ribohyal®**-t) tartalmazó, hipoozmoláris műkönyggél száraz szem szindróma kezelésére.

JAVALLATOK: A **Revihyal®** riboflavinnal konjugált hialuronsavat (**ribohyal®**-t) tartalmazó, hipoozmoláris műkönyggél száraz szem szindróma kezelésére.

A szemfelszín szárazsága *gyulladásos* állapot, amely a könnyfilm összetevőinek változása vált ki. Ekkor a könny mennyisége és minősége (víz, mukózus anyagok és lipidek) nem lesz elegendő. A **Revihyal®** oldat *lubrikálja* a szaruhártyát és a kötőhártyát, továbbá *tápláló, védő* és antioxidáns hatású a külső környezeti, például a fizikai (hő, traumás), fény (okostelefon, TV, PC, napfény) és kémiai (folyékony és gáz halmazállapotú szennyező anyagok) hatások ártalmaival szemben.

A termék tehát minden beteg részére javasolt, akiknek a szemfelszín lubrikálására és az oxidatív stressz csökkentésére van szüksége.

A termék alkalmazható kontaktlencse viselése mellett is.

Ezenkívül az oldat jellegzetes *hipoozmolaritása* lehetővé teszi a száraz szem szindróma esetén a könny hiperozmolaritásának újbóli kiegyensúlyozását.

Az E-vitamin TPGS képes amfifil micella szerkezeteket létrehozni. Ennek köszönhetően, a szemészeti oldat a Meibom mirigyek működési zavarai miatt keletkező száraz szem szindrómák esetén támogatni tudja a megváltozott lipidréteg természetes helyreállítását. Valamint az E-vitamin TPGS micella struktúrák kialakítására szolgáló képessége révén lehetővé teszi a konjugált hialuronsav számára, hogy mechanikusan kapcsolódjon a sejtekhez, támogatva a könnyfilm patogén okok miatt sérült mukózus rétegének helyreállítását, a trofizmust és a hámréteg regenerálódását.

A gél a normál szemcseppekhez hasonlóan alkalmazandó, másodpercek alatt szétterül, és stabil védőréteget képez a könnyfilm felett, a könny korai elpárolgását ellensúlyozva.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Használat előtt távolítsa el a garanciazáras gyűrűt;
2. Nyissa ki a flakont és távolítsa el a védőkupakot;
3. Óvatosan nyomja meg a flakont és cseppentsen 2–4 cseppet mindkét szembe, vagy kövesse az orvos tanácsát.

Szükség esetén ismételje meg;

Használatot követően azonnal zárja vissza a flakont: annak megmaradt tartalma az első felbontástól számított 2 hónapig újra felhasználható. A termék alkalmazható kontaktlencse viselése mellett is.

ÖSSZETÉTEL: ribohyal® 0,1%, E-vitamin TPGS 0,2%, nátrium-citrát, kétbázisú nátrium-foszfát, nátrium-klorid, tisztított víz.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

A termék kizárólag külső szemészeti alkalmazásra szolgál. A terméket csak egyetlen beteg használhatja.

Ne használja az összetevőkkel szembeni ismert intolerancia vagy túlérzékenység esetén. Ne használja a terméket, ha a csomagolás első felnyitáskor sérült vagy nem teljesen zárt. Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl.

Amennyiben problémát tapasztal a használat során, szakítsa meg a használatot és forduljon orvoshoz.

A termék alkalmazása alatt a tartály adagoló végével ne érintse meg a szemét vagy bármely felületet.

A lejárati idő az ép és megfelelően tárolt termékre vonatkozik.

MELLÉKHATÁSOK: Néhány ritka esetben korábbi szaruhártya-betegségben szenvedő és foszfáttartalmú szemészeti készítményekkel kezelt betegeknel szaruhártya-mikrokalcifikáció volt megfigyelhető. Ebben az esetben függessze fel azonnal a kezelést és tájékoztassa kezelőorvosát.

CSOMAGOLÁS: 10 ml-es flakon, tartósítószer-mentes.

TÁROLÁS MÓDJA: Eredeti csomagolásban tárolja 5 és 30 °C közötti hőmérsékleten, és tartsa az eszközt fénytől védett helyen.

Használat után zárja vissza a flakont: annak megmaradt tartalma az első felbontástól számított 2 hónapig újra felhasználható.

LEJÁRATI IDŐ: Felbontatlan csomagolás mellett ne lépje túl a dobozon és a flakonon feltüntetett lejáratit időt. Ne válassza szét a tartalmat a külső csomagolástól és a beteg tájékoztatótól annak érdekében, hogy a termék helyes használatához szükséges összes információ elérhető legyen.

GYÁRTÓ:

IROMED GROUP S.r.l.
Via Tempio del Cielo 3/5
00144 Roma
(Olaszország)

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

SAGER Pharma Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 122–124.
B. Magyarország

ILLETÉKES HATÓSÁG:

Nemzeti Népegészségügyi és
Gyógyszerészeti Központ
1135 Budapest, Szabolcs utca 33. E-mail:
amd.vig@nngyk.gov.hu

CE₀₃₇₃ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ, amely megfelel a 93/42/EGK irányelvnek, valamint módosításainak és kiegészítéseinek.



A tartályt a használatot követően ne dobja el a környezetben.



A készítmény gyermekektől távol tartandó.